



CLICK

*Jen Click  
od zářivého úsměvu*

**Prozářené úsměvy  
během pouhých  
10 minut**

**BLANCOONE<sup>®</sup>**

Prémiové bělení zubů

# BlancOne®: Nový milník v bělení zubů

Systémy BlancOne® jsou výsledkem **15letého výzkumu**, který vedl k **novému přístupu** k bělení zubů, a to na základě vývoje **nových světelně chemických technologií**.

To, že světlo vyzařované stomatologickými lampami nezvyšuje účinnost peroxidů používaných při bělení a jen mírně urychluje reakci díky teplu přenášenému do gelu, je dobře známým faktem.

Fotochemické gely **BlancOne®** obsahují kromě peroxidu navíc **dvě speciální složky**, které jej umí rozložit tak **účinným způsobem a rychlostí, které nelze dosáhnout chemickými reakcemi tradičních bělicích systémů**.

- **FOTOSENZIBILIZÁTORY**, speciální barevné prostředky, které **využívají fotony** vyzařované lampou se specifickými vlnovými délkami a **dosahují „aktivního stavu“** přenášejícího na celý systém značné množství energie.
- **KATALYZÁTORY**, které tuto energii syntetizují a **spouštějí sérii řetězových reakcí** výrazně urychlujících rozklad peroxidů.

Tento „výbušný“ mechanismus energie umí vytvořit, během několika minut, odlišný druh kyslíku: **SINGLETOVÝ KYSLÍK**, atomovou formu kyslíku bez volných radikálů, schopnou provádět oxidační účinek mnohem rychleji, hlouběji a bezpečněji, než je tomu v případě volných radikálů (ROS) vznikajících u tradičních bělicích systémů.



## SINGLETOVÝ KYSLÍK



APLIKOVANÝ  
GEL

PO 5  
MINUTÁCH

PO 10  
MINUTÁCH



BlancOne®  
Video

# Vše začíná se systémem CLICK

S obvyklým zlepšením o 4-5 odstínů bílé\*, cenou pro pacienta ve výši **několika málo eur** a pohodlným ošetřením **trvajícím jen několik minut**, je systém BlancOne® CLICK novou koncepcí bělení, která je **IDEÁLNÍM** startovním bodem, který umožní každému okamžitou zkušenost s bělejší a zářivější úsměvem.

- ✓ **IDEÁLNÍ** pro seznámení se s bělením
- ✓ **IDEÁLNÍ** pro ty, kdo mají omezený rozpočet
- ✓ **IDEÁLNÍ** k zakončení každé dentální hygieny
- ✓ **IDEÁLNÍ** k propagačnímu marketingu ordinace

S více než 100000 ošetření provedených v loňském roce jen v Itálii a indexem spokojenosti pacientů 4,5 z 5, se systém BlancOne® CLICK již stal **volbou číslo jedna** zubních lékařů a pacientů!

\* Odstíny posuzované podle klasického vzorníku Vita Classic upraveného pro bělení. Údaje shromážděny na základě 10956 případů zaznamenaných díky aplikaci BlancOne PRO.



## Radost z nového úsměvu

BLANCONE  
**Clean&White**  
Dentální hygiena & Bělení zubů



# Jak dosáhnout nejlepších výsledků pro úsměv vašich pacientů

Poté, co své pacienty překvapíte s BlancOne® CLICK, můžete jim ukázat, **jak lze dosáhnout ještě překvapivějších a trvalejších výsledků.**


Podle jejich preferencí, rozpočtu a compliance pacienta jim můžete nabídnout 4 různé strategie:

CLICK

## Opakování

**ošetření systémem CLICK každých 3 až 6 měsíců**

BlancOne CLICK je **velice šetrné ošetření**, které **může podstoupit každý** a je jej možné **často opakovat**. Je to ideální doplněk ke každé dentální hygieně.

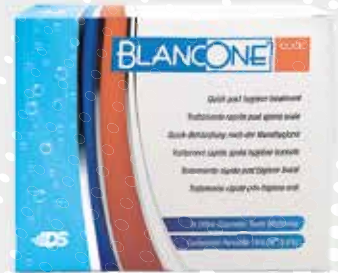

TOUCH

## Zlepšení

**výsledku díky intenzivnímu bělení pomocí systému TOUCH**

BlancOne® TOUCH je **intenzivní verzi systému CLICK** ve 3-4 aplikacích během jedné návštěvy. **Jedná se o šetrné a účinné bělení**, které **může vést k hlubšímu a trvalejšímu odstínu bílé.**



HOME+

## Kombinované

**domácí bělení zubů HOME+**

**Okamžité výsledky** můžete zkombinovat se systémem **CLICK HOME+** je k dispozici ve třech verzích **FAST** (rychlý den), **DAY NIGHT** (noční) a **EVER** (na noc pro udržení, citlivé zuby a do alignerů).



Patentované složení

RITUALS

## Udržování

**s řadou RITUALS**

Řada produktů BlancOne® RITUALS zahrnuje řadu produktů určených pro **krásu a každodenní zdraví vašeho úsměvu a lze ji kombinovat s jakýmkoli ošetřením** v ordinaci, aby se udržely jeho výsledky.

- Naše produkty Rituals zahrnují:
- DUETTO ACTIVE a DUETTO CARE bělicí zubní pasta.
- Bělicí pero BlancOne® STICK
- Náš bělicí zubní kartáček BlancOne BRUSH
- BlancOne® LIPS, balzámy na rty

Tyto výrobky jsou k dispozici jak jednotlivě, tak v rámci **krabičky Rituals, HOME pro 3měsíční udržovací program.**



ULTRA+

## Léčba diskolorovaných zubů

**Pro obtížné případy a náročné pacienty** zahrnuje řada BlancOne® ULTRA+, **lékařské ošetření s fotochemickou aktivací, 35% peroxidem vodíku.** Ošetření ULTRA+ je vhodné pro **závažná zbarvení**, jako jsou tetracyklinové skvrny a nevitální zuby, vyžaduje použití gingiválních bariéry a zahrnuje až 4 krátké cykly (8 min.) během jednoho sezení, aby bylo dosaženo skutečně překvapivých výsledků bez citlivosti.



BlancOne® ULTRA+ je léčebný přípravek (směrnice EU 93/42). Jeho použití může být v některých zemích EU omezeno místními předpisy.

V ORDINACI

DOMA

# Fotoaktivační lampa BlancOne® ARCUS

Technologická inovace BlancOne® je možná také díky exkluzivní lampě BlancOne® ARCUS, která **přináší několik výhod:**

- **Ošetření BlancOne® bylo koncipováno pro špičkový výkon** s lampou **BlancOne® Arcus**
- 10 výkonných 5wattových led světel zaručuje **špičkovou účinnost a rychlé časy** uvedené v protokolech BlancOne®.
- Široký oblouk a umístění led diod až k jeho okrajům zaručují **úplnou aktivaci gelu na celém zubním oblouku** včetně stran.

BlancOne® ARCUS je k dispozici ve dvou verzích: mobilní na kolečkách nebo k upevnění na stomatologické jednotky.

**Každá Arcus® Lampa se 2 sadami:**

**Cube** Startovací set Blancone Bělení

**CARE** set s příslušenstvím pro bezpečnou a komfortní léčbu



## Marketing


BlancOne® vám nabízí řadu programů a nástrojů pro **rozvoj vašeho podnikání v oblasti bělení zubů.**

- **Marketingové nástroje**, které vám pomohou propagovat bělicí ošetření.
- **Speciální aplikace** pro správu ošetření.
- **Akce věnované pacientům**, věrnostní programy White for Life a iniciativu Den otevřených dveří.
- **Sociální a webové kanály**, které můžete propojit, abyste získali spoustu nových pacientů.
- **Mapa autorizovaných center BlancOne®**, která umožní novým pacientům vás najít.

### Uvítací balíček zdarma



### Clean & White Program

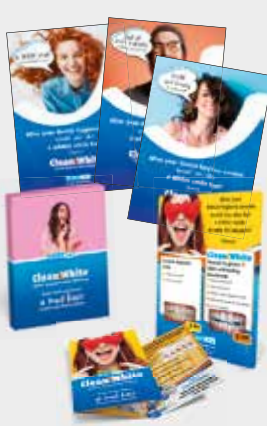

### Pacientské kampaně



### Dárkové sady



## Noví pacienti Vás hledají...



# Staňte se kvalifikovaným odborníkem BlancOne®

## Udělejte ze své ordinace centrum excelence v bělení zubů

**Pro pacienty** je BlancOne® nejen synonymem inovativních a bezpečných ošetření, ale také **zárukou**, že je provádí **kvalifikovaný odborník**, jak to vyžaduje evropská směrnice o bělení zubů.

Naskenováním QR kódů ošetření pomocí aplikace BlancOne PRO a prostřednictvím kurzů BlancOne Academy, **získáváte kredity za školení, které zvyšují vaši odbornou kvalifikaci** i úroveň kvalifikace centra. Ošetření obsažená ve startovací sadě CUBE a základní výukové kurzy dostupné na webových stránkách BlancOne Academy jsou dostatečné **k akreditaci vaší ordinace mezi autorizovaná centra BlancOne zveřejněná na oficiálních webových stránkách pro pacienty a k získání úvodního balíčku.**

Spolu s kredity za školení získáváte prostřednictvím procedur a kurzů BlancOne také body do fan shopu, za které můžete zdarma **získat produkty RITUALS, pomůcky a marketingové materiály** pro lepší propagaci bělení zubů a spokojenosti vašich pacientů.

**Zaregistrujte se nyní jako specialista** BlancOne na webových stránkách [blancone.eu/pro](http://blancone.eu/pro) nebo stažením aplikace BlancOne PRO a získáte přístup k výhodám pro vás a vaši praxi.

## BlancOne® PRO App: Silný nástroj určený pro Blancone profesionály

Kromě získání kreditů za školení, které zvýší vaši odbornou kvalifikaci a kvalifikaci vašeho centra, vám aplikace BlancOne® PRO nabízí řadu výhod, které ještě více ozvláštňují vaše ošetření bělením zubů BlancOne®.

Alternativně k pouhému naskenování QR kódu vám aplikace umožňuje **profilovat pacienty**, získat **index obtížnosti případu** a indikaci doporučených ošetření. Můžete snadno a rychle vytvořit **kartu ošetření**, kde můžete shromažďovat veškeré informace (typ ošetření, odstín a fotografie před a po ošetření, případně nežádoucí účinky, doplňkové udržovací produkty, kontrolní vyšetření atd.).

System zašle **certifikát o provedeném ošetření vašemu pacientovi**, který bude moci **zanechat hodnocení**.

Prostřednictvím tohoto nástroje budete mít ve své vyhrazené oblasti na portálu BlancOne® k dispozici databázi a statistiky, které vám **umožní sledovat a rozvíjet vaše bělení**.

Stáhněte si aplikaci BlancOne® PRO:



## BlancOne® Akademie Nejnovější poznatky v oblasti bělení zubů

Akademie nabízí odborníkům BlancOne® **kompletní a profesionální školení na téma bělení zubů** založené na důkladném **vědeckém výzkumu** a **zkušenostech sdílených** mezinárodním týmem zubních lékařů a dentálních hygienistek.

Prostřednictvím **webinářů, osobních akcí a kurzů** na vyžádání budete moci zvýšit své dovednosti. navrhovat a co nejlépe provádět bělicí ošetření a vybírat nejhodnější řešení pro každou pacientku na základě jejích potřeb.

Akademie jsou rozděleny do 3 oblastí:

- ✓ **VĚDECKÉ POZNATKY** - dozvíte se více o procesech a vědeckých důkazech, které stojí za bělením zubů.
- ✓ **KLINICKÉ** - objevte nejlepší techniky, protokoly a triky pro řešení každého případu
- ✓ **ZKUŠENOSTI** - správný způsob, jak nabídnout bělení a zajistit pozitivní zkušenost.

**Přístup do Akademie BlancOne® nyní získáte pomocí svého profesionálního účtu [academy.blancone.eu](http://academy.blancone.eu)**



# BlancOne® CLICK: Bělení které promění Vaši praxi

Inovativní technologie BlancOne® umožnila vyvinout BlancOne® CLICK, revoluční a jedinečné bělení zubů, které je rychlé a lze jej kombinovat s dentální hygienou.

## Účinnost při nízkých koncentracích

Poprvé jsme zajistili účinnost ordinačního bělení i při nízkých koncentracích peroxidu vodíku (<6 %) v souladu s evropskou směrnicí 84/2011, nejmodernějším souborem opatření pro bezpečnost spotřebitelů.



## Žádné gingivální bariéry

Vyvinuli jsme **jediné ordinační bělení, které nepotřebuje ochranu sliznic**, čímž jsme odstranili nejobtížnější pasáž **procedurey, kterou lze provést jednoduchým a bezpečným způsobem.**



## Účinnost za pouhých 10 minut

Díky fotochemické technologii BlancOne® je odbourávání karbamidperoxidu o koncentraci 16 %, které běžně trvá hodiny, hyper-urychleno během několika minut.

**Ošetření je mnohem rychlejší a pohodlnější a lze jej spojit s dentální hygienou.**



## Žádná bolest ani citlivost

Díky velmi rychlému působení **nejsou všechna ošetření BlancOne® v ordinaci agresivní a nedehydratují sklovinu, nevyvolávají bolest ani citlivost**, ve skutečnosti jsou jediná na trhu bez desenzibilizačních a remineralizačních látek.




## Dostupné a opakovatelné

Díky rychlým sezením a nízkým nákladům lze BlancOne® CLICK nabízet **za cenu dostupnou pro všechny**. Je ideální pro první krok k bělení, **lze jej pravidelně opakovat** a je vstupní branou k intenzivnějšímu ošetření.




### Účinnost bělení

43 000 pacientů

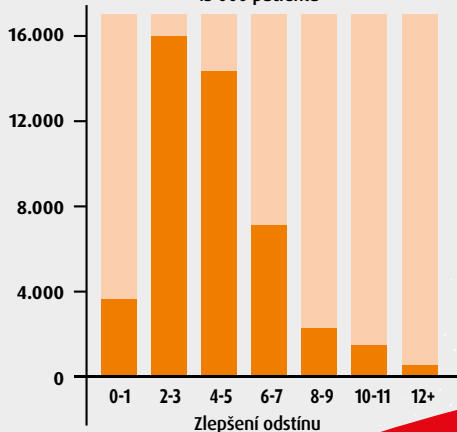

### Index spokojenosti

2 100 pacientů

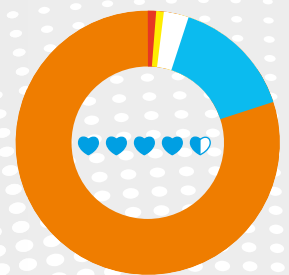



























1 2 3 4 5



# WOW!

WOW



	Typ	Specifikace	Aktivní složky	Léčebný protokol	Charakteristika účinku
<b>ORDINAČNÍ</b>	Rychlé bělení 	Rychlé ordinační	Karbamid Peroxid 16 % (HP 5,6 %)	1 aplikace po 10 minutách každá	 Účinnost  Stabilita
	Intenzivní bělení zubů 	Ordinační kosmetické	Karbamid Peroxid 16 % (HP 5,6 %)	3 aplikace po 8 minutách každá	 Účinnost  Stabilita
		Ordinační pro lékařské účely	35 % Peroxid Vodíku	3/4 aplikace po 8 minutách každá	 Účinnost  Stabilita
<b>DOMÁCÍ BĚLENÍ</b>		Denní rychlé bělení	HP 6.0 % nHAP 0.5 % Vitamínový booster aktivátor	10-15 aplikací 45 minut	 Účinnost  Stabilita
		Noční bělení Endodontiké ošetření	CP 12% (HP 4.2 %) nHAP 0.5 % Vitamínový booster	10-15 aplikací přes noc	 Účinnost  Stabilita
		Ortodoncie Alignery Citlivé zuby Udržovací kúra	CP 7% (HP 2.4 %) nHAP 1.0 % Vitamínový booster	10-15 aplikací přes noc	 Účinnost  Stabilita
	Udržování 	3měsíční udržovací program	 BRUSH Bělící zubní kartáček  Zubní pasta DUETTO Aktivní Odstraňovač skvrn  DUETTO Care Regenerační zubní pasta  STICK - bělící pero CP 16% (HP 5,6 %)  RTY Balzám na rty	Každodenní použití	 Účinnost  Stabilita

\* aktivace světlem s bělící lampou Arcus

**BLANCONE®**

[www.blancone.eu/cz](http://www.blancone.eu/cz)  
beleni@blancone.cz

 [blancone.eu](https://www.facebook.com/blancone.eu)

 [blancone\\_ids](https://www.instagram.com/blancone_ids)

 [blancone](https://www.youtube.com/blancone)

 [blancone\\_cz\\_sk](https://www.instagram.com/blancone_cz_sk)



Blanc Dental SE - Křižovnická 86/6 - Praha 110 00  
tel.: +420 723 616 888 - email: [beleni@blancone.cz](mailto:beleni@blancone.cz)  
[www.blancone.eu/cz](http://www.blancone.eu/cz)

BlancOne je registrovaná obchodní značka IDS Spa